

医療分野の技術をご家庭に

innerScan® DUAL



RD-900・RD-901

医療分野の技術をご家庭に

innerScan® DUAL



RD-900・RD-901

新ブランド誕生

innerScan® **DUAL**

インナースキャン デュアル


医療分野の技術をご家庭に

タニタでは、医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の先進技術を家庭用体組成計に取り入れます。

今までの体組成計は、1つの周波数で体を測定していましたが、インナースキャンデュアルは、医療分野や研究施設等で主流となっている2つの周波数(デュアル周波数)で測定します。

それにより、より正確な体組成の算出ができるようになり、健診・研究用に使われるプロフェッショナル体組成計に近い高精度な測定をご家庭でも可能となりました。

デュアル周波数測定イメージ図

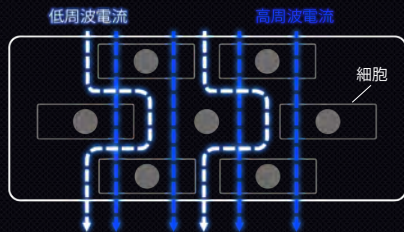

体組成を手元で確認

国内メーカー初！ Bluetooth® V4.0 対応体組成計。
iPhone で測定結果を管理できます。
かがんでスマホをかざさなくても立ったまま使えます。




※「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc の登録商標です。
※iPhone、App Store は Apple inc の商標です。

測定データの確認方法は2通り

1 本体ですぐに チェック

RD-901の表示例

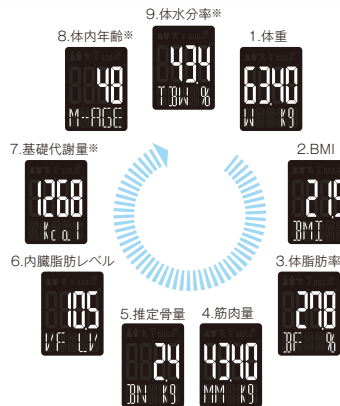

測定結果を
スクロール表示します。

商品の特長は P5・P6 へ ▶

2 専用アプリで 楽しく健康管理




iPhone の
専用アプリと連携。

アプリの紹介は P7~P12 へ ▶

RD-900・901 のデータ通信機能は
iPhone (4S以降) 専用です。

乗るピタ機能

乗るだけで登録者の中から測定者を認識し自動で測定します。

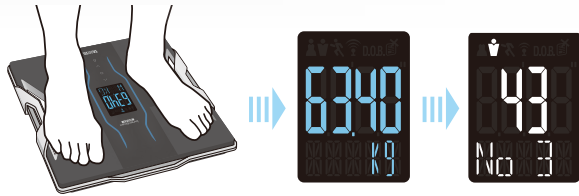


電源が入っていないことを確認し、素足で乗ります。

はじめに体重が表示されます。

認識された個人データが表示されます。


3色のバックライトで測定結果の判定が直感的にわかる

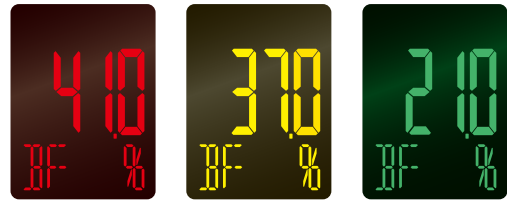


判定結果は、赤・黄・緑の3色のバックライトの点滅でわかりやすく表示します。



登録番号によって選べる4色

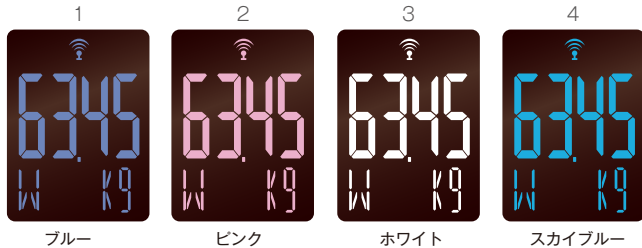カラーバックライト LCD を搭載。
登録番号によってブルー・ピンク・ホワイト・スカイブルーの中から好きな色が選べます。



判定色			
BMI判定 (※体重/BMI表示時に使用)	肥満度2以上	肥満度1・やせ	普通
体脂肪率判定	肥満	軽肥満・やせ	－標準・＋標準
内臓脂肪レベル判定	過剰	やや過剰	標準
筋肉量判定	少ない	－	標準・多い
基礎代謝量判定 (※基礎代謝量/体内年齢表示時に使用)	少ない	－	標準・多い
推定骨量判定	少ない	やや少ない	標準・多い



測定データのグラフ化で健康的なからだづくりを!

健康管理アプリ HealthPlanet

健康をはかるリーディングカンパニー、タニタが提供する健康管理サイト「ヘルスプラネット」アプリ。体重・体脂肪・歩数などをグラフ化し、目標の実現に向けた、効率の良いダイエット・健康管理をサポートします。

機能

- ・グラフ機能(2項目同時表示、目標値表示)
- ・画面の表示項目を自由に編集可能
- ・パートナーサイトに測定データをクラウド連携

タニタの健康応援ネットワーク
からだカルテ

goo からだログ

eatsmart

JogNote

DietClub

Slim Check

- ・体組成、歩数、血圧、尿糖のデータも表示可能



可愛いヒロインと一緒に
ランニングバトルで楽しくダイエット!

ランニング応援ゲーム なんしょう! 2+

もっとカッコよくなりたい! 綺麗になりたい! という紳士淑女を応援する、走る習慣がない人のための“萌え”ランニングアプリ。iPhoneの加速度センサーを利用し、手に持ってその場で駆け足すれば、部屋の中にいながらしてランニングを楽しむことができます。また、GPSモードに変更して外を走れば、1人でも本格的な長距離レースを楽しむことが可能です。シリーズ累計36万ダウンロード達成の人気アプリです。

機能

- ・可愛いヒロインと毎日コミュニケーション
- ・数十種類のイベントを季節毎に順次配信
- ・日々の成果をカレンダーにスタンプ
- ・ゲットしたボイスや画像をコレクション
- ・ラップタイムを友達と競争する「ランキングシステム」
- ・ユーザー同士の活性化コミュニティ「チャットシステム」





トレーニングの成果が
貴方のふとしをイケメンに！

イケメン育成ダイエット-ふとしの部屋

「太っています」「基本家から出ません」「少しネガティブです」「オシャレは苦手です」
そんなふとしをイケメンに変える新感覚ダイエットアプリ。

「ダイエットが続かない」「一人じゃなかなか続かない」「誰かと一緒にダイエットが
したい」そんな方はふとしと一緒に頑張ってみませんか？

ハッピーエンドを目指してレッツダイエット！

機能

- ・体重管理、体重グラフ表示
- ・腕、お腹、足のエクササイズ機能
- ・エクササイズ履歴機能
- ・どんどん魅力的(?)になるふとしと会話ができる！コミュニケーション機能
- ・ふとし着せ替え機能




割れた腹筋を手に入れる！
続けるための本気のトレーニング

365日 腹筋アプリ SitApp

毎日iPhoneで腹筋しよう！角度センサーを使用して腹筋の回数を自動で
カウント。100万ダウンロード突破の人気アプリです。

機能

- ・今日の残り回数をアイコンバッジで表示
- ・標準カレンダーにトレーニングの記録が可能
- ・twitter,facebook,LINE への投稿が可能
- ・リマインダー機能
- ・グラフ機能
- ・シリーズ内でかんたん移動
- ・お気に入りの音楽再生機能

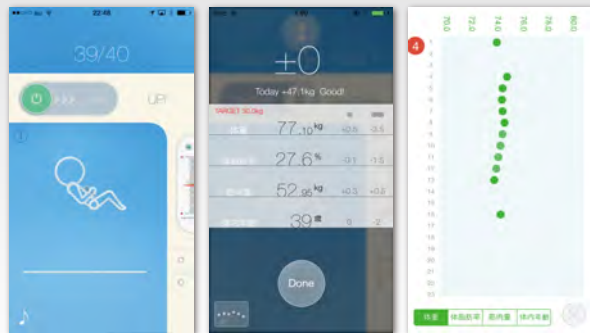

連携可能な iPhone アプリは で人気 の 4 種類 !



■ アプリで見られる測定項目

iPhone アプリ		 HealthPlanet	 ねんしょう! 2+	 ふとしの部屋	 365日筋トレアプリ SitApp
特長		測定データのグラフ化で健康的なからだづくりを!	ソンドレファン必見! 可愛いヒロインと一緒にランニングバトル	トレーニングの成果が貴方のふとしをイケメンに!	割れた腹筋を手に入れる! 続けるための本気のトレーニング
体組成連携機能	体重	○	○	○	○
	BMI	○	○	○	—
	体脂肪率	○	○	○	○
	筋肉量	○	○	○	○
	推定骨量	○	○	○	—
	内臓脂肪レベル	○	○	○	—
	基礎代謝量	○	○	○	—
	体内年齢	○	○	○	○
	体水分率	○	○	○	—
	グラフ	○	○	○	○
クラウド連携 (会員登録必要)	○	—	—	—	
トレーニング連携機能	ランニング	—	○	—	—
	腹筋	—	—	○	○
	スクワット	—	—	○	○
	二の腕ひきしめ	—	—	○	—
	腕立て	—	—	—	○
	背筋	—	—	—	○

本体の仕様

		体組成計 インナースキャンデュアル RD-900	体組成計 インナースキャンデュアル RD-901	
ボディデザイン		 BK(ブラック) WH(ホワイト)	 BK(ブラック) WH(ホワイト)	
価格		オープン価格	オープン価格	
JAN コード		BK : 4904785814950 WH : 4904785815124	BK : 4904785814974 WH : 4904785815131	
表示項目	体重	最小表示 100g 単位*	50g 単位*	
		最大計量	180 kg	
		体脂肪率	0.1% 単位	
		BMI	0.1 単位	
		推定骨量	100g 単位	
		筋肉量	100g 単位*	50g 単位*
		内臓脂肪レベル	0.5 レベル単位	
		基礎代謝量	— 専用アプリにて確認可能	1kcal/日単位
	体内年齢	— 専用アプリにて確認可能	1 才単位	
	体水分率	— 専用アプリにて確認可能	0.1% 単位	
電源	DC6V アルカリ単 3 乾電池 × 4 本			
消費電流	最大 250mA			
本体寸法 (質量)	D298×W328×H31mm (約 2.1 kg / 乾電池含)	D298×W328×H32mm (約 2.1 kg / 乾電池含)		
通信方式	Bluetooth® version 4.0 (Low Energy support)			

*0～100kg まで、100kg 以上の場合は RD-900 は 200g 単位、RD-901 は 100g 単位になります。

- ・本機は、からだの電気抵抗をはかることで体組成を推測しています。
- ・100 以上の方は参考値としてご覧ください。
- ・体脂肪率、BMI、推定骨量、筋肉量は 6～99 才が対象年齢です。
- ・内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率は 18～99 才が対象年齢です。
- ・体脂肪率 6 才から、その他測定項目は 18 才から判定します。(体水分率のみ判定がありません)
- ・本商品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備が内蔵されています。
- ・海外でご使用になると罰せられることがあるため、日本国内でご使用ください。

商品のホームページ、取扱説明書は QR コードからアクセスできます。

RD-900



http://www.tanita.co.jp/shop/g/_RD900BK

RD-901



http://www.tanita.co.jp/shop/g/_RD901BK

タニタ商品のお買求めは当店へ……

- このカタログの内容は2014年6月のものです。●デザイン・仕様・価格は変更になることもあります。
- 商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

TANITA Corporation

RD9010814 201405-1

株式会社 **タニタ**

お客様サービス相談室 ☎ 0570(099)655 受付時間 9:00～18:00(土日祭日を除く)

本社・東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
営業所／大阪 名古屋 福岡 北日本

<http://www.tanita.co.jp>